

CÉGES/INTÉZMÉNYI SZŰRÉS
„STANDARD Q COVID-19 Ag” BIOSENSOR- ROCHE ANTIGÉN
GYORSTESZTTTEL
A LEGGYORSABB és LEGMEGBÍZHATÓBB TESZT VÍRUSFERTŐZÖTTség
KIMUTATÁSÁRA

Ismerje meg a legújabb, leggyorsabb, és megbízhatóságban is élen álló SARSCoV-2 Vírus antigén kimutatásán alapuló, Standard Q Covid -19 Ag gyors teszttel való szűrés lehetőségét!

Miért a „Standard Q COVID-19 Antigén” tesztet válassza?

- A „Standard Q COVID-19 Ag” az első és **jelenleg egyetlen (!) antigén alapú gyors teszt mely szerepel a WHO - 2020. szeptember 23-án frissített - az "Emergency Use Listing for In vitro diagnostics (IVDs) Detecting SARS-CoV-2" listáján.**
- **A teszt szenzitivitása 96,52% specifitása 99,68%,**
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a fals negatív eredmények kockázata 3,5%, a hamis pozitív eredményeké pedig kevesebb mint 1%).
- **Dél Koreai termék, gyártó: SD Biosensor , globális disztribúciós partner: Roche**
- Érdekesség: emellett a teszt mellett döntött Szlovákia, ezzel tesztelték a hétvégén a teljes lakosságot és több vezető klasszikus légitársaság is ezt a tesztet használja beszállításkor.
- Az általunk értékesített termék **minden Magyarországon szükséges hatályos engedéllyel rendelkezik OGYÉI engedélyszáma: 54783-3-/2020**
- **További megfeleltetések**

EN ISO 13485:2016 EN ISO 18113-1:2011

EN ISO 14971:2012 EN ISO 18113-2:2011

EN ISO 23640:2015 EN ISO 15223-1:2016

EN ISO 17511:2003 EN 62366:2008

EN 13612:2002

A „Standard Q COVID-19 Antigén” teszt illetve tesztelés előnyei:

» Előnyök

- | | |
|--|--|
|  Alkalmas betegágy melletti tesztelésre |  Szobahőmérsékleten tárolható |
|  Egyszerű használat |  Használatra kész reagensek |
|  Gyors eredmény 30 percen belül | |

- Ezen teszt, a jelenleg piacon lévő gyors tesztekkel ellentétben nem a vírusra adott immunreakciót, hanem **a vírus jelenlétét vizsgálja**, így a fertőzést hamarabb, nagyobb hatékonysággal képes kimutatni a jelenleg elérhető tesztekhez képest.
- Hasonlóan a PCR vizsgálatokhoz, a **fertőzés kezdeti szakaszát detektálja**. A fertőzöttségtől számított 2-3. naptól kimutatja a vírus jelenlétét.

- A PCR vizsgálatoknál kevésbé érzékeny, viszont **gyorsabb, költséghatékonyabb és könnyebb vele külső helyszínen tesztelni az egészségügyi szakdolgozóknak.**
- A teszt min. **15-max 30 perc alatt látható eredményt** mutat, mely pozitív eredmény esetén lehetővé teszi a munkakörnyezetből való azonnali szeparálást, ezzel is gátolva a munkahelyen történő nagyszámú megbetegedést.
- Ez a protokoll kiválóan alkalmas cégek, szervezetek, irodák, termelőüzemek szűrésére, megelőzve járványügyi gócpontok kialakulását. A tesztelés ismétlése 10-14 naponta javasolt.

A teszt professzionális használatra szolgál.


Amennyiben Önök rendelkeznek eu. szakszemélyzettel, a „Standard Q COVID-19 Ag” teszt önmagában is rendelhető 25 teszt/ doboz kiszerelésben.

Ár: 7.000,- Ft+ 5% Áfa / teszt = bruttó 7350.-Ft

Vásárlás kizárólag dobozonként lehetséges, azaz 25 db teszt/ doboz egységenként várjuk a megrendeléseket. Megbontott doboz értékesítésre nincs lehetőség. (tehát pl. ha 30 tesztet szeretne, akkor 2 doboz, azaz 50 db teszt megvásárlása szükséges)

A teszteteket raktárról szállítjuk.

PCR és Antigen és Antitest gyors teszt összehasonítása, a fertőzöttség mely periódusában alkalmazzuk

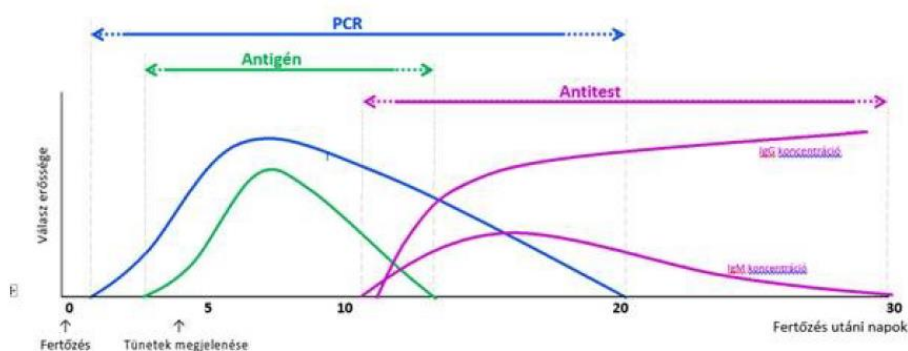

PCR és Antigen és Antitest gyors teszt szenzitivitás összehasonítása

Kategória	Termék	Leírás	Minta	Érzékenység	Specifikáció
PCR	Standard M	NCoV Real Time detection kit	Orr/ garat nyálkahártyából	100%	100%
Antigen	Standard Q	COVID-19 Antigen Teszt	Orr/ garat nyálkahártyából	96,52 %	99,68%
Antitest	Standard Q	COVID-19 Antitest teszt	vércsepp	93,90%	95,74 %

» A teszt minden szükséges eszközt tartalmaz



Testt eszköz (egyenkénti fóliás tasakban szálítottan)



Extraháló puffercső



Cseppentő kupak



Steril mintavevő pálcák



Műanyag tartóshávy


» Vizsgálati eljárás




1 Helyezzen egy steril mintavevő pálcát a beteg orrnyúkjába, és vezesse be a hátsó orrnyeregbe




2 Torolja át a hátsó orrnyereg felületét

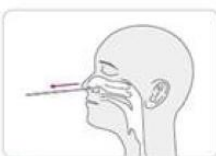

3 Húzza ki a steril mintavevő pálcát az orrnyeregéből

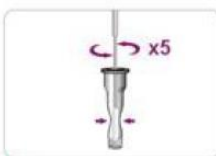

4 Helyezze a pálcát egy extraháló puffercsőbe. A puffercső összenyomásakor több mint ötször forgassa meg a tamponot.

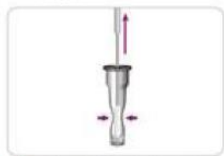

5 Távolítsa el a pálcát, miközben megzörgeti a cső oldalát, hogy a folyadék kiájljon a tamponból



6 Szorosan nyomja rá a cseppentő kupakot a csőre




7 Cseppentsen 3 csepp kivont mintát a teszt eszköz nyílásába



8 Olvassa le a teszt eredményét 15-30 percen belül

» A teszt eredményének értelmezése

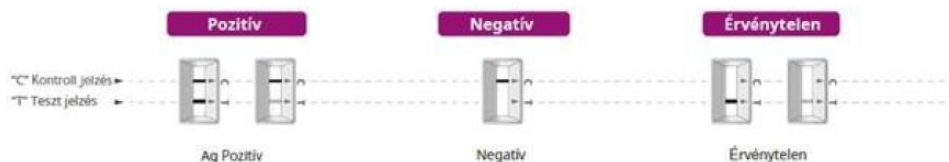

Megrendelés kizárólag írásban történik.

Visszaigazolásunkat követően előlegbekérőt állítunk ki.

Budapesten személyes átvételre van lehetőség, vidéki kiszállítás futárszolgálattal 1940.- Ft

Elérhetőség:

Leme Szolgáltató Kft

1112 Budapest, Kékperje u. 8.

Tel: 70 4545610

www.biztosvedelem.store

